


# Instrukcja do pobrania próbki krwi

1. Umyj ręce w ciepłej wodzie, co zmiękczy skórę i poprawi przepływ krwi.
2. Wyjmij z opakowania ochronnego probówkę na krew (Microvette), a następnie zdejmij pomarańczową osłonkę.
3. Wybierz palec, z którego będzie pobierana krew, oczyść gazikiem dezynfekcyjnym (dostarczonym w zestawie) i pozostaw do wyschnięcia.
4. Zdejmij osłonkę z lancetu (rys. 1, kolor lancetu może być inny niż na zdjęciu).
5. Dotknij czerwonym końcem lancetu skórę palca, z którego będzie pobierana krew, a następnie delikatnie naciśnij (rys. 2). Możesz poczuć niewielkie ukłucie w momencie przebijania skóry.
6. Delikatnie pomasuj palec w kierunku ukłucia, aby uzyskać kroplę krwi.
7. Przeciągnij delikatnie przekłuty palec po obrzeżu probówki, tak ażeby krew spłynęła do środka. Powtarzaj tę czynność dopóki nie wypełnisz próbówki krwią do połowy (rys. 3)\*.
8. Po pobraniu próbki, nałóż osłonkę pomarańczową z powrotem na probówkę i dociśnij, tak aby się zatrzasnęła.
9. Wpisz swoje dane (imię, nazwisko, data urodzenia) na plastikowym pojemniku ochronnym, włóż do niego próbkę, a następnie go zakręć (rys. 4).
10. Wypełnij załączony formularz.
11. Zużyty lancet umieść ponownie w plastikowym woreczku.
12. Do płaskiego plastikowego pudełka zestawu włóż:
  - (a) plastikowy pojemnik, w którym jest umieszczona próbówka z Twoją krwią,
  - (b) wypełniony formularz
13. Wyślij zestaw z pobraną próbką krwi na uzgodniony adres.

*\*Kolejny lancet jest dołączony do zestawu na wypadek potrzeby przekłucia drugiego palca, tak aby uzyskać odpowiednią ilość krwi.*

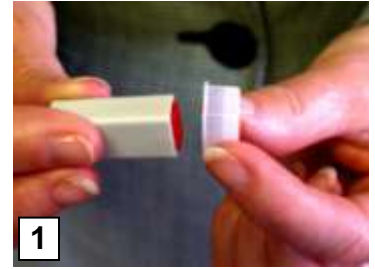

**W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 012 3994334 lub mailowy [info@foodprint.pl](mailto:info@foodprint.pl)**

## Bezpieczny lancet

Wyprodukowano i oznaczono symbolem CE zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC przez MediPurpose Pte Ltd. Singapore. Numer Partii: NSP45/2007. Do zużycia przed 2011/11. Wysterylizowane. **DO JEDNORAZOWEGO UŻYCIA**

## Microvette – probówka na krew

Wyprodukowana i oznaczona symbolem CE zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC przez Sarstedt Ltd, 68 Bolton Road, Leicester LE4 1AW. Numer Partii: 7070801. Do zużycia przed 2010/03. **DO JEDNORAZOWEGO UŻYCIA**



Zestaw został wyprodukowany i dostarczony przez  
**Cambridge Nutritional Sciences**, Wielka Brytania.

## ZESTAW DO POBRANIA PRÓBKI KRWI

*Przed rozpoczęciem zapoznaj się dokładnie z Instrukcją pobrania próbki krwi.*

*Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.*

### Zawartość opakowania:

1. **Microvette:** Probówka do pobrania krwi, wyłącznie do jednorazowego użycia (wyprodukowana i oznaczona symbolem CE zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC przez Sarstedt Ltd, 68 Bolton Road, Leicester LE4 1AW).
2. **Bezpieczny lancet:** Lancet do przekłucia palca, wyłącznie do jednorazowego użycia. Drugi lancet jest dołączony na wypadek potrzeby pobrania krwi z innego palca (wyprodukowana i oznaczona symbolem CE [CE 0197] zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC przez MediPurpose Pte Ltd. Singapore).
3. **Gazik dezynfekcyjny**
4. **Plastyczny woreczek na zużyte materiały.**
5. **Plastyczny pojemnik ochronny dla probówkę.**
6. **Formularz zlecenia**
7. **Instrukcja pobrania próbki krwi**

